

Pairing des kabellosen Handschalters der Pflegebetten-Serie Dali

Die Betten der neuen Dali-Serie punkten mit einem kabellosen Handschalter, der für große Flexibilität und mehr Lebensqualität sorgt. Wenn das Bett in einem neuen Haushalt aufgebaut wird, muss dieser Handschalter mit der Steuerung des Dali per Bluetooth verbunden werden – das sogenannte „Pairing“. In der Regel erledigt dies ein Mitarbeiter des Sanitätshauses.

Technisch funktioniert das Pairing wie die Verbindung Ihres Smartphones mit Ihrem Auto oder einem kabellosen Lautsprecher in Ihrem Haushalt. Die erste Verbindung der Bluetooth-Komponenten initialisiert sich innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Pairing-Vorgang.

Führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Netzteil einstecken: Nun haben Sie 20 Sekunden Zeit für das Pairing des Handschalters.
2. Beide Tasten der Höhenverstellung (2. Reihe am Handschalter) gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.
3. Die Bluetooth Verbindung wird initialisiert, dies dauert 20 Sekunden.



1. Sollte zum Transport noch der Sperrmagnet am Handschalter befestigt sein, entfernen Sie diesen bitte. Schließen Sie danach das Schaltnetzteil des Bettes an die Steckdose an. Nun haben Sie 20 Sekunden Zeit, um das Pairing wie folgt durchzuführen.



2. Richten Sie den Handschalter nahe der Rückenlehne auf das Bett. Drücken Sie die beiden Tasten in der 2. Reihe (Höhenverstellung der Liegefläche) mindestens 5 Sekunden lang herunter. Bitte achten Sie darauf, die Tasten gleichzeitig und nicht zeitversetzt zu drücken.



3. Das Pairing benötigt ca. 20 Sekunden für die Herstellung der Bluetooth Verbindung. Testen Sie nun den Erfolg des Pairings, indem Sie die linke obere Taste am Handschalter drücken. Wenn sich die Rückenlehne aufrichtet, ist der Vorgang abgeschlossen.