




## ARTROMOT®-S2 Pro ARTROMOT®-S3

Motorisierte Bewegungsschienen  
mit Handprogrammiereinheit: „Text“

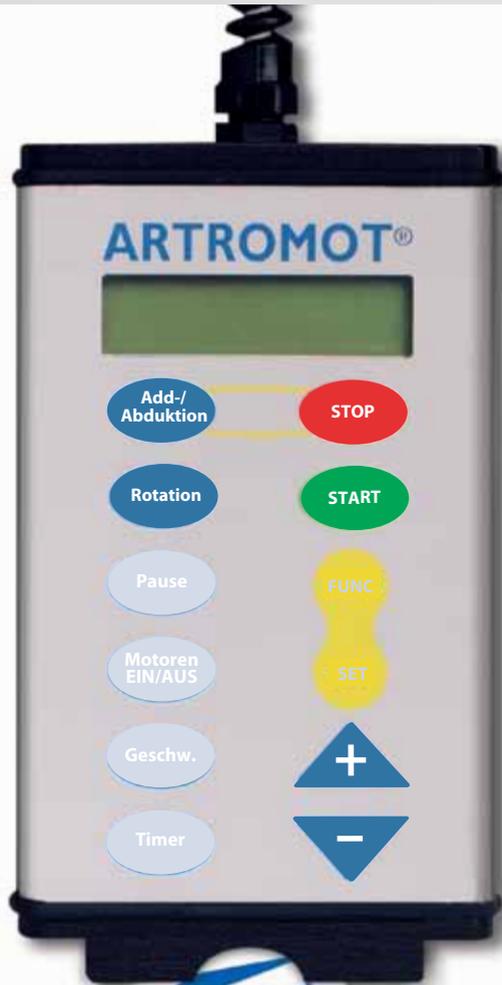



**Adduktion** =  
seitliches Senken des Armes

**Abduktion** =  
seitliches Heben des Armes

**Innenrotation** =  
Drehen des Armes nach innen

**Außenrotation** =  
Drehen des Armes nach außen

## ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen

### Kurzanleitung<sup>1</sup> zur Handprogrammiereinheit „Text“

#### Starten/Stoppen

1. **Netzstecker** einstecken.
2. Bewegungsschiene am **Netzschalter** einschalten.
3. **Patienten-Chipkarte** in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
4. **Starten:**  drücken.
5. **Stoppen:**  drücken.

#### Programmieren

6. **Zuerst gleichzeitig**   kurz drücken.

(Auf der Anzeige steht jetzt **Adduktion**), dann

- 6.1 **Seitliches Senken des Armes (Adduktion)<sup>2</sup> einstellen:**



zum Verändern der Werte drücken.

- 6.2 **Seitliches Heben des Armes (Abduktion)<sup>2</sup> einstellen:**



drücken,



zum Verändern der Werte drücken.

- 6.3 **Speichern der Einstellungen**



drücken. Zum **Starten** des Gerätes  drücken.

7. **Drehen des Armes nach innen und aussen**

**(Innen- und Außenrotation)<sup>2</sup>** werden wie Schritt 6 eingestellt.

Taste  drücken.



**Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.**



<sup>1</sup> Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen mit Handkontroller „Text“ von DJO Global.

Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung und ärztliche Einweisung.

<sup>2</sup> Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

# ARTROMOT®

## Schulterbewegungsschienen

Die ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.

### Warum hat der Arzt Ihnen die Bewegungstherapie verordnet?

- um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen.
- um die Heilung von Gelenknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern.
- zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes.
- zur Sicherung des Behandlungserfolgs

### Wie oft sollen Sie täglich üben?

- Soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 4 bis 5 mal täglich je 60 Minuten empfohlen.
- Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

### Wer holt die Bewegungsschiene wieder bei Ihnen ab?

- 3 Tage vor Ablauf der Verordnungszeit rufen Sie bitte Ihren Patientenbetreuer unter der nachstehenden Telefonnummer an, und wir organisieren die Abholung.

Patientenbetreuer: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

### Sie haben Fragen?

Ihr **DJO Global-ARTROMOT®-Team** steht Ihnen gerne zur Verfügung,

**Tel. 0761 4566 5121 · Fax 0800 3 676 333**

**E-Mail: [artromot.de@DJOglobal.com](mailto:artromot.de@DJOglobal.com)**

Gute Besserung wünscht Ihr **DJO Global-ARTROMOT®-Team**

AIRCAST®

DONJOY®

ORMED®

PROCARE

Compex®

chattanooga®



ORMED GmbH  
Merzhauser Str. 112 · 79100 Freiburg · Deutschland  
[www.DJOglobal.de](http://www.DJOglobal.de)



*Together in Motion™*